

Overføring av innstillinger fra tidligere pumpe til t:slim X2

Navn	Dato
------	------

TRINN 1

Fyll inn **ALLE** tidssegment og pumpeinnstillinger fra pumpen som brukes til tabellene under.

BASALPROFIL		
	TID	BASAL HASTIGHET
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
Total Basal:		

INSULINFØLSOMHET		
	TID	ISF
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

KARBOHYDRATFAKTOR		
	TID	I:K
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

BLODSUKKERMÅL		
	TID	BG-MÅL
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

TRINN 2

Fyll inn i innstillingene under.

LENGDE PÅ IOB	MAKS BOLUS	AUTO AV
		<input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV

TRINN 3

A: Flytt over **ALLE** tidssegment fra kolonnene "TID" til venstre til kolonnen "TID" i Personlig profil i tabellen under.



B: Flytt over **ALLE** innstillinger fra TRINN 1 (basal, ISF, I:K og BG mål) inn i tilsvarende tid i tabellen under. Huk av **HVER** innstilling slik at du ikke glemmer noe.

PERSONLIG PROFIL				
TID	BASAL HASTIGHET	ISF	I:K	BG-MÅL
				Total Basal

TRINN 4

- > Kontroller at **ALLE** tidssegment er korrekte og i kronologisk rekkefølge, og at alle innstillinger er med.
- > Programmer inn **ALLE** innstillinger fra tabellen inn i din t:slim X2. Kontroller at total basal er korrekt.