

# Ny programvareoppdatering til din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe med **Control-IQ™** teknologi

Tandem Diabetes Care utvikler kontinuerlig programvaren i insulinpumpen for å optimere behandlingen og møte brukernes ønsker.

Den nye programvareoppdateringen til insulinpumpen Tandem t:slim X2 gir økt brukervennlighet og tydeligere oversikt.

## Nye funksjoner:

**Bolusikoner** i CGM grafen gir enda bedre oversikt. Allerede i pumpens startskjerm kan man se sine bolusdoser og korreksjonsdoser, noe som gjør det lettere å ta behandlingsbeslutninger. Tre ulike bolusikoner brukes for å vise normal bolus, forlenget bolus og automatisk korreksjonsbolus.


**Ny praktisk timerfunksjon** når man trenger å stoppe insulinleveringen manuelt. Man kan nå stille inn en stopp av leveringen på 15, 30, 45 eller 60 minutter, noe som vil gi en større fleksibilitet. Når tiden som er valgt er gått ut får man en påminnelse om å gjenoppta doseringen.

Når man skal **fylle kanylen** har pumpen nå alternativ som er bedre tilpasset de tilgjengelige infusjonssettene. Standard innstilling er 0,3 enheter, men man kan også velge 0,5 og 0,7 enheter avhengig av hvilket infusjonssett man bruker. Dette gjør bytte av infusjonssett lettere. Man kan fortsatt angi en annen mengde ved behov.


For at du kun skal få varsel når det virkelig trengs har **varselet "Control-IQ høy" blitt justert**. Nå gjentas det hver annen time så lenge forutsetningene er til stede eller forutsetningene på nytt er aktuelle.

Hvis **Treningsprofilen** og **Søvnplanen** overlapper i tidsinnstillingen, går pumpen automatisk over i Søvnplanen når Treningsprofilen slås av. Dette er praktisk hvis man bruker Treningsprofilen sent på kvelden.


### Bolusikoner i CGM grafen

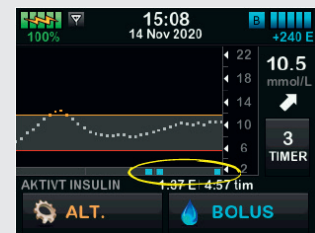

Normal bolus

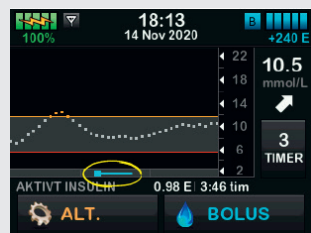


Forlenget bolus

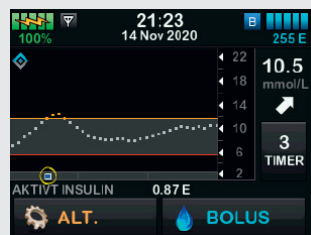

Automatisk korreksjonsbolus

### Timerfunksjon når pumpen stoppes manuelt

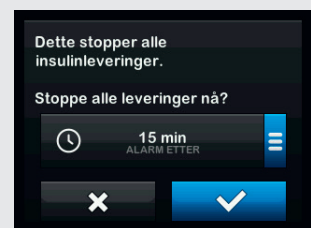

### Forinnstillinger for "Fyll kanylen"



Gjelder kun programvare 7.6