
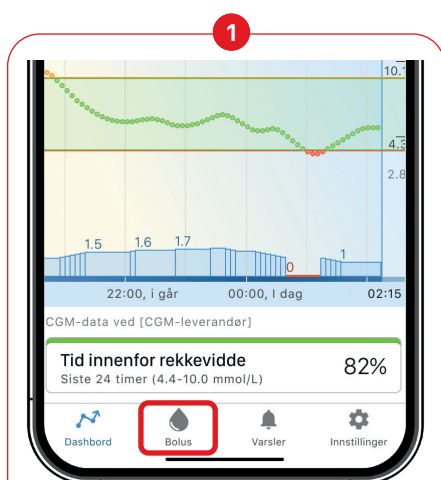


Bolusdosering med Tandem t:slim mobile app

For å kunne dosere en bolus med Tandem t:slim mobile app™ trengs en kompatibel telefon som er parkoblet med insulinpumpen Tandem t:slim X2™ via en aktiv Bluetooth® tilkobling.*


Mer informasjon om compatible enheter finnes i appguiden som du finner inne i Tandem t:slim mobile app.

Obs: Dette er et forkortet instruksjonsmateriale. Kun enkelte trinn og skjermbilder vises. For mer detaljert informasjon henviser vi til bruksanvisningen for Tandem t:slim X2™ insulinpumpe.

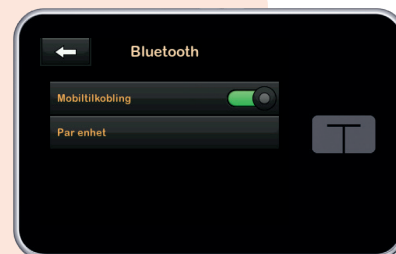


Trykk på **Bolus** i navigeringsfeltet.

Merk: For å dosere en forlenget bolus eller hurtigbolus må du bruke insulinpumpen Tandem t:slim X2.

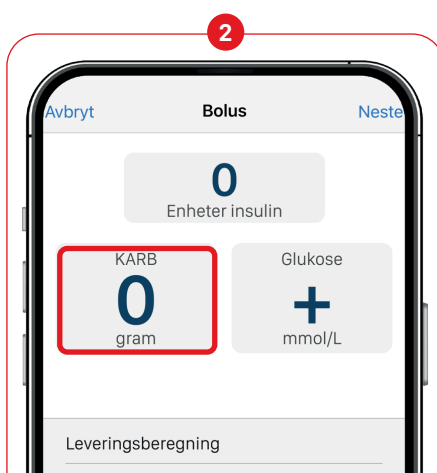


Trykk på **0 gram** for å legge inn mengden karbohydrater for bolusdosering.

Merk: Hvis det markerte området viser «enheter» istedenfor «gram» er karbohydratfunksjonen slått av i den aktuelle personlige profilen.

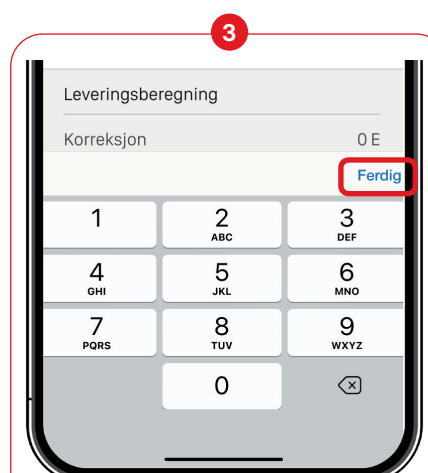


Angi ønsket verdi for mengden karbohydrater. Trykk **Ferdig** for å fortsette.

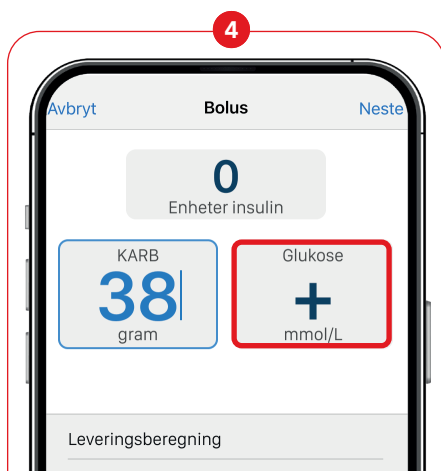

Trykk på **+mmol/L** for å angi glukoseverdi (BG verdi) og trykk så på **Ferdig**.


Merk: Med Control-IQ aktivert fylles BG automatisk inn fra din CGM.

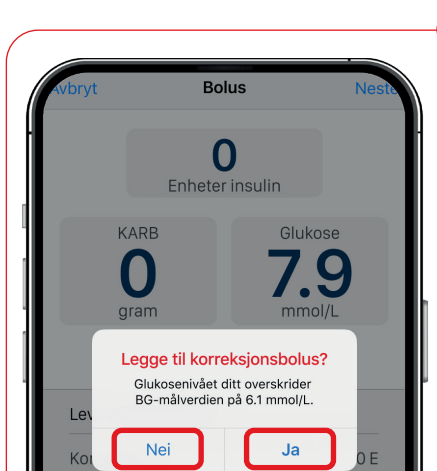

Hvis glukoseverdien som angis er over BG-målverdien kommer et forslag om å legge til en korreksjonsbolus til å vises. Trykk på **Ja** eller **Nei**.



Hvis glukoseverdien som angis er under BG-målverdien kommer et forslag om å redusere beregnet bolus til å vises. Trykk på **Ja** eller **Nei**.

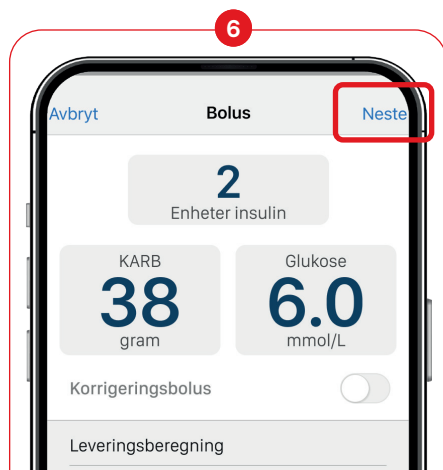


Trykk på **Neste** (iOS) eller **Høyre pil** (Android) for å fortsette.

Merk: Hvis en beregnet bolus er større enn din innstilte maksbolus kommer bolusen til å bli redusert. Du kan også endre bolusmengden manuelt ved å trykke på de beregnede enhetene øverst oppe på skjermen.



Trykk på **Bekreft** (iOS) eller **Hake** (Android) for å bekrefte.

Merk: Beregningene baseres på innstillingene av Karb.forhold og Korreksjonsfaktor i din aktive personlige profil.

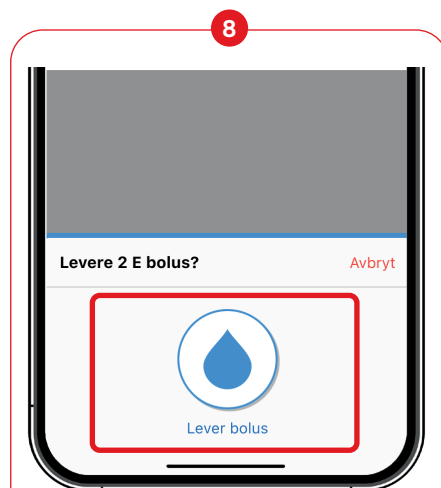

Trykk på **Dosere bolus**. Bruk telefonens sikkerhetsfunksjon for å bekrefte. En skjerm med teksten Bolus bekreftet vises både på pumpen og i appen.



For å avbryte en pågående bolus, trykk på **X** i appens navigeringsfelt eller på pumpens startskjerm. Bekreft stoppet.

*Å dosere bolus fra Tandem t:slim mobile app krever en kompatibel telefon og operativsystem, en oppdatering av programvaren i insulinpumpen Tandem t:slim X2 og gjennomført opplæring.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet for subkutan dosering av insulin i henhold til ordineringsplan, for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Pumpen kan på en pålitelig og sikker måte kommunisere med kompatible, digitalt tilkoblede enheter.

Control-IQ-teknologi er beregnet for bruk med en kompatibel kontinuerlig glukosemåler (CGM) og insulinpumpen Tandem t:slim X2 for automatisk å øke, redusere eller pause tilførselen av basalinsulin basert på CGM-avlesninger og forutsette glukoseverdier. Control-IQ teknologien kan også gi korreksjonsbolus når glukoseverdien forventes å overstige en forhåndsdefinert terskelverdi. Pumpen er godkjent for bruk hos personer fra 6 år og oppover som trenger en total daglig insulindose på minst 10 enheter og som veier minst 25 kilogram. Pumpen er beregnet for bruk av en enkelt pasient. Se bruksanvisningen for en liste over kompatible insulintyper.

ADVARSEL: Control-IQ teknologi skal ikke brukes av personer under 6 år. Control-IQ teknologi skal heller ikke brukes av personer som trenger mindre enn 10 enheter insulin per dag eller som veier mindre enn 25 kilogram.

Systemet er ikke godkjent for bruk hos gravide kvinner, personer i dialysebehandling eller kritisk syke pasienter. Ikke bruk systemet ved behandling med hydroksyurea. Brukere av pumpen og systemet må: Ønske, og være i stand til å bruke insulinpumpen, CGM og alle andre systemkomponenter i samsvar med bruksanvisningen. Kontrollere blodsukkeret i henhold til anbefalinger fra helsepersonell. Ha tilstrekkelig kunnskap om karbohydratberegning. Opprettholde nødvendig kunnskap om egenbehandling av diabetes. Regelmessig oppsøke helsepersonell. Ha tilstrekkelig syn og/eller hørsel til å oppfatte alle pumpens funksjoner, inkludert advarsler, alarmer og påminnelser. Dersom CGM-avlesningene ikke samsvarer med symptomene eller forventninger, skal blodsukkeret kontrolleres med en blodsukkermåler før det tas avgjørelser om diabetesbehandlingen. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 må kobles fra før MR, CT eller diatermibehandling. Besøk tandemdiabetes.com/safetyinfo for mer viktig sikkerhetsinformasjon.

Informasjonen på skjermen i Tandem t:slim mobile app samsvarer ikke nødvendigvis alltid med informasjonen på pumpeskjermen. Trådløse opplaster fra Tandem t:slim mobile app til den skybaserte Tandem Source-plattformen krever en kompatibel smarttelefon og en trådløs data- eller nettverkstilkobling. Helsepersonell bør ikke bruke opplaster til Tandem Source-plattformen til fjernovervåking, ettersom opplastingen ikke skjer i sanntid. Standard datakostnader fra mobiloperatøren kan påløpe.

Tandem t:slim X2 mobile app: Tandem t:slim mobile app er ment som en sekundær skjerm, en speiling av insulinpumpen Tandem t:slim X2, og kan trådløst laste opp pumpedata til Tandem Source-plattformen. Tandem mobile app er ikke ment for å styre en insulinpumpe og skal ikke erstatte informasjonen som vises på insulinpumpen. Doseringsbeslutninger bør ikke tas basert på den sekundære skjermen. Brukeren skal følge instruksjonene på CGM og insulinpumpen. Denne sekundære skjermen er ikke ment å skulle erstatte selvmonitorering og egenomsorg anbefalt av lege.