


Parkoble insulinpumpen med Tandem t:slim mobile app

Når parkoblingen er fullført overføres pumpe- og behandlingsinformasjon trådløst til Tandem Source™ plattformen.

Obs: Dette er et forkortet instruksjonsmateriale. Kun enkelte trinn og skjermbilder vises. For mer detaljert informasjon henviser vi til bruksanvisningen for Tandem t:slim X2™ insulinpumpe.



1

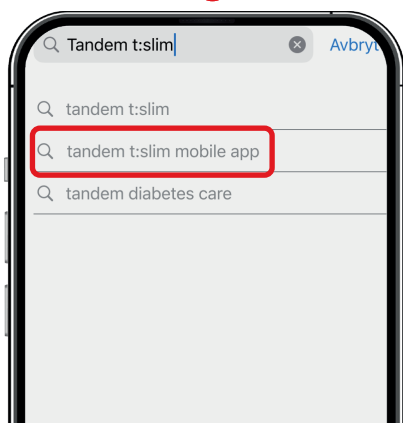

For å laste ned appen, åpne App Store® på iPhone eller Google Play™ på Android telefoner. Søk etter «Tandem t:slim» og installer Tandem t:slim mobile app™.

2




Åpne Tandem t:slim mobile app og logg inn hvis du allerede har en konto eller lag en ny konto.



Pumpetips: Din telefon kan kun parkobles til en insulinpumpe via Tandem t:slim mobile app. Pumpen er designet for å blokkere andre tilkoblinger.

3

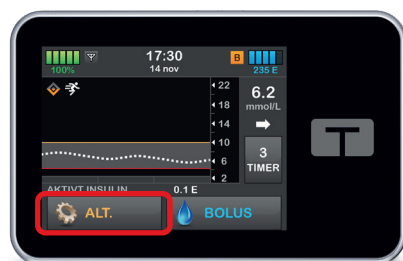

På startskjermen i pumpen, trykk på **ALTERNATIVER**.

Obs! For at insulinpumpen Tandem t:slim X2 skal virke sammen med Tandem t:slim mobile app må den parkobles med en kompatibel telefon via Bluetooth (R).

4



Trykk på pil ned og velg **Enhetsinnstillinger**.

5




Trykk på **Bluetooth-innstillinger**

6




Trykk på knappen for på/av ved siden av **Mobiltilkobling**.

7

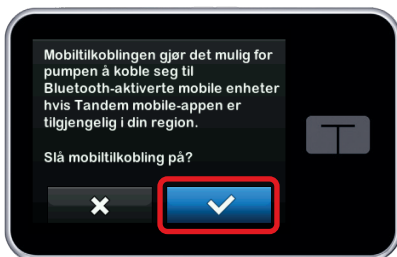

Trykk på  for å fortsette. Skjermen **MOBILTILKOBLING** vises.

8

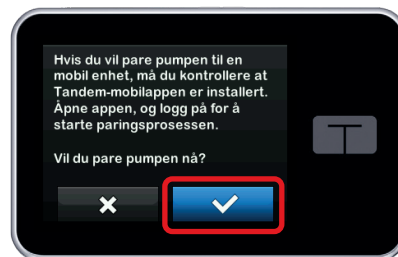

8. En bekreftelsesskjerm vises for å verifisere parkoblingen. Trykk på  for å fortsette.

9




Trykk på **Begynn** og så **OK** for å bekrefte at du vil aktivere mobiltilkoblingen.

10



Velg alternativet ved siden av insulinpumpens serienummer og trykk **Neste**.

11

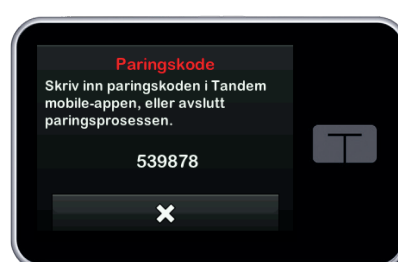

11. En unik parkoblingskode genereres automatisk.

Trykk ikke på  -knappen ettersom det avbryter prosessen.

Parkoblingskoden er kun gyldig i 5 minutter. Hvis tiden løper ut, må parkoblingsprosessen startes på nytt.



12



Angi parkoblingskoden i appen og trykk på **Pare med pumpe**.

13



13. En bekreftelsesskjerm vises på pumpen. Velg **OK** for å fortsette.

14



Trykk på **Synkroniser pumpedata** for å importere pumpedataene til skyen

15



Når Tandem t:slim mobile app viser pumpedata er den klar til å brukes.



Tips for appen: Tandem t:slim mobile app™ må være aktiv i bakgrunnen for å kunne ta imot og sende data mellom insulin-pumpen og Tandem Source™.*

Innstillinger i din mobil:

- ✓ For at appen skal virke optimalt, slå av Zoom innstillinger i telefonen. Hvis Zoom er aktivert må du bruke insulinpumpen for alle behandlingsbeslutninger.
- ✓ Slå på varsler og deaktivert batterioptimalisering for å sikre at du mottar insulinpumpens alarmer, varsler og påminnelser på den parkoblede telefonen.
- ✓ Aktiver sikkerhetsfunksjoner som skjermlås, passord eller ansiktsgjenkjenning før du doserer en bolus via appen. **





*Helsepersonell om omsorgspersoner bør ikke bruke opplastingene til Tandem Source plattformen for fjernovervåking da opplastingene ikke skjer i sanntid. Standard dataavgifter fra mobiloperatøren kan forekomme.

** Å dosere en bolus fra Tandem t:slim mobile app krever en kompatibel telefon og operativsystem, en programvareoppdatering av insulinpumpen Tandem t:slim X2 og gjennomført opplæring.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet for subkutan dosering av insulin i henhold til ordinerings, for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Pumpen kan på en pålitelig og sikker måte kommunisere med kompatible, digitalt tilkoblede enheter.

Control-IQ-teknologi er beregnet for bruk med en kompatibel kontinuerlig glukosemåler (CGM) og insulinpumpen Tandem t:slim X2 for automatisk å øke, redusere eller pause tilførselen av basalinsulin basert på CGM-avlesninger og forutsette glukoseverdier. Control-IQ teknologien kan også gi korreksjonsbolus når glukoseverdien forventes å overstige en forhåndsdefinert terskelverdi. Pumpen er godkjent for bruk hos personer fra 6 år og oppover som trenger en total daglig insulindose på minst 10 enheter og som veier minst 25 kilogram. Pumpen er beregnet for bruk av en enkelt pasient. Se bruksanvisningen for en liste over kompatible insulintyper.

ADVARSEL: Control-IQ teknologi skal ikke brukes av personer under 6 år. Control-IQ teknologi skal heller ikke brukes av personer som trenger mindre enn 10 enheter insulin per dag eller som veier mindre enn 25 kilogram.

Systemet er ikke godkjent for bruk hos gravide kvinner, personer i dialysebehandling eller kritisk syke pasienter. Ikke bruk systemet ved behandling med hydroksyurea. Brukere av pumpen og systemet må: Ønske, og være i stand til å bruke insulinpumpen, CGM og alle andre systemkomponenter i samsvar med bruksanvisningen. Kontrollere blodsukkeret i henhold til anbefalinger fra helsepersonell. Ha tilstrekkelig kunnskap om karbohydratberegning. Opprettholde nødvendig kunnskap om egenbehandling av diabetes. Regelmessig oppsøke helsepersonell. Ha tilstrekkelig syn og/eller hørsel til å oppfatte alle pumpens funksjoner, inkludert advarsler, alarmer og påminnelser. Dersom CGM-avlesningene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, skal blodsukkeret kontrolleres med en blodsuktermåler før det tas avgjørelser om diabetesbehandlingen. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 må kobles fra før MR, CT eller diatermibehandling. Besøk tandemdiabetes.com/safetyinfo for mer viktig sikkerhetsinformasjon.

Informasjonen på skjermen i Tandem t:slim mobile app samsvarer ikke nødvendigvis alltid med informasjonen på pumpeskjermen. Trådløse opplaster fra Tandem t:slim mobile app til den skybaserte Tandem Source-plattformen krever en kompatibel smarttelefon og en trådløs data- eller nettverkstilkobling. Helsepersonell bør ikke bruke opplaster til Tandem Source-plattformen til fjernovervåking, ettersom opplastingen ikke skjer i sanntid. Standard datakostnader fra mobiloperatøren kan påløpe.

Tandem t:slim X2 mobile app: Tandem t:slim mobile app er ment som en sekundær skjerm, en speiling av insulinpumpen Tandem t:slim X2, og kan trådløst laste opp pumpedata til Tandem Source-plattformen. Tandem mobile app er ikke ment for å styre en insulinpumpe og skal ikke erstatte informasjonen som vises på insulinpumpen. Doseringsbeslutninger bør ikke tas basert på den sekundære skjermen. Brukeren skal følge instruksjonene på CGM og insulinpumpen. Denne sekundære skjermen er ikke ment å skulle erstatte selvmonitorering og egenomsorg anbefalt av lege.



Meld deg på
vårt nyhetsbrev

Rubin Medical skal lansere flere nye produkter i tiden som kommer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, å få informasjon om våre nye produktlanseringer. Du vil også få nyttig informasjon om insulinpumpen Tandem t:slim X2 og i tillegg få invitasjoner til ulike typer forelesninger.

Rubin
medical

rubinmedical.no

© 2025 Rubin Medical AB. Alle rettigheter forbeholdes. Tandem Diabetes Care er et registret varemerke og t:slim X2™, Control-IQ™ og mobile app™ er varemerker som tilhører Tandem Diabetes Inc. Apple og Apple logo er varemerker som tilhører Apple Inc. Og som er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play logo er varemerker som tilhører Google LLC. Alle andre veremerker fra tredjepart tilhører deres respektive eiere.

Tel 480 80 830

t:slim X2™
Insulin Pump

NO-2183-250414