
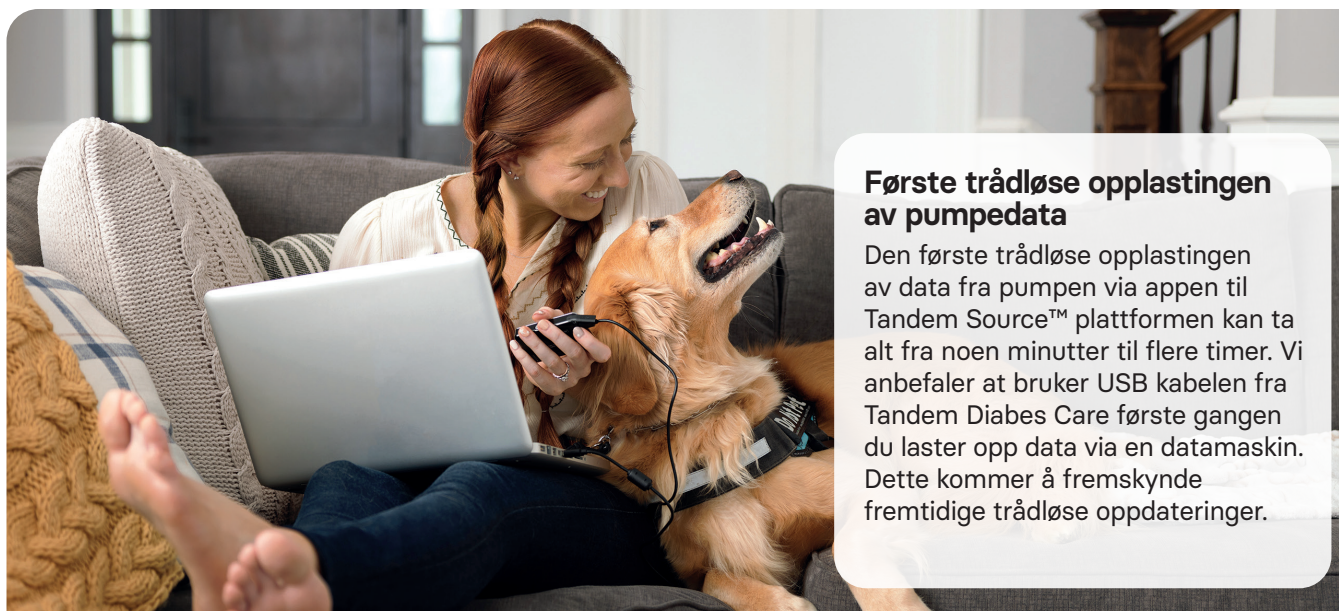


Guide for innstillinger i Tandem t:slim mobile app

For å bruke Tandem t:slim mobile app™ trenger man en kompatibel telefon og operativsystem. Besøk tandemdiabetes.com/compatibility for å sjekke at enheten er kompatibel.

Obs: Dette er et forkortet instruksjonsmateriale. Kun enkelte trinn og skjermbilder vises. For mer detaljert informasjon henviser vi til bruksanvisningen for Tandem t:slim X2™ insulinpumpe.

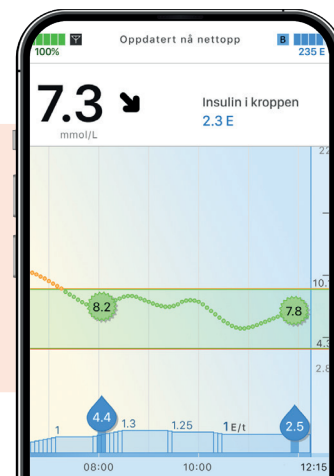

Første trådløse opplastingen av pumpedata

Den første trådløse opplastingen av data fra pumpen via appen til Tandem Source™ plattformen kan ta alt fra noen minutter til flere timer. Vi anbefaler at bruker USB kabelen fra Tandem Diabetes Care første gangen du laster opp data via en datamaskin. Dette kommer å fremskynde fremtidige trådløse oppdateringer.

Telefoninnstillinger

✓ Inaktivere zoom funksjonen når du bruker Tandem t:slim mobile app™.

For å bruke Tandem t:slim mobile app må du slå av zoom-funksjonen. Det alternativet finner du under **Tilgjengelighet** på telefonen.

✓ Deaktiver automatiske oppdateringer.

For å sikre at appen er kompatibel med operativsystemet bør man slå av automatiske oppdateringer. Det gjør at man kan kontrollere kompatibiliteten manuelt.

✓ Aktiver sikkerhetsfunksjoner på telefonen

Før man programmerer pumpen og justerer insulintilførselen bør man aktivere sikkerhetsfunksjonene som skjermlås, sikkerhetskode og/eller ansiktsgjenkjenning på telefonen. Dette hjelper til med å beskytte din enhet og dine data.

✓ Aktivere varsler og tillat nødvendige tillatelser.

For å sikre at man får alle pumpevarsler og alarmer bør man:

- Aktivere varsler på telefonen.
- Deaktivere strømsparing (Low Power Mode), som kan begrense varsler.
- Godkjenne alle tillatelsesforespørsler appen ber om, for å være sikker på å ikke gå glipp av viktige beskjeder fra pumpen.






Logg inn eller lag en ny konto.

Hvis man allerede har en Tandem Source™ konto, logg inn med e-postadresse og passord.

For nye brukere er det mulig å lage en personlig konto eller en konto for foresatte.

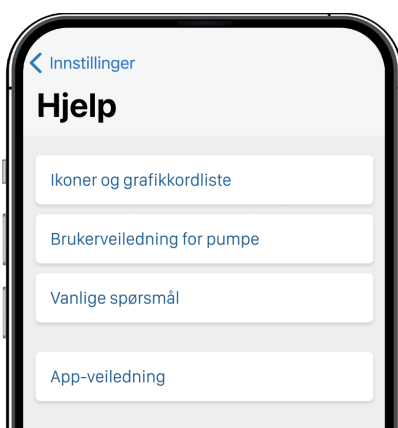

Enkel oversikt over skjermen.

I appen finnes en ikon- og grafikkordliste som hjelper til med å forstå ikonene og grafikken på skjermen. Den finner man under Innstillinger og Hjelp. Der er det beskrivelse av hvert enkelt ikon og grafiske enheter på skjermen.



Klar til å starte?

Bruk hurtigguiden for å parkoble Tandem t:slim mobile app™ med insulinpumpen Tandem t:slim X2™.

For ytterligere informasjon om hvordan man stiller inn telefonen, se App-veiledning som finner under Innstillinger og Hjelp.



Tips og feilsøking

Tips og instruksjoner for å løse eventuelle problem som kan oppstå ved bruk av Tandem t:slim mobile app.

✓ Husk avstanden på 1,5 meter

For at appen skal forbli tilkoblet til insulinpumpen Tandem t:slim X2™ og kunne laste opp pumpedata må telefonen være innenfor 1,5 meter fra pumpen.

✓ Stopp ikke appen.

Appen må være i gang i bakgrunnen for å kunne ta i mot og sende data til og fra insulinpumpen. Dette er også nødvendig for å motta varsler fra pumpen.

✓ Passord.

Del aldri passord og tillat ikke andre å bruke telefonen. Dette for å unngå utilsiktede endringer i insulinleveringen.

✓ Ødelagt telefon.

Hvis telefonen er ødelagt skal man ikke bruke appen. Bruk insulinpumpen til telefonen kan erstattes.

✓ Brutt tilkobling.

Hvis tilkoblingen brytes, sjekk Bluetooth® menyen på telefonen for å bekrefte at insulinpumpen er tilkoblet. Hvis den ikke er det, trykk på pumpens navn i listen for å koble til igjen.

✓ Tilkoblingsutfordringer

Hvis man har problemer med å koble pumpen til appen, følg trinnene under:

- Steng appen helt via appinnstillinger på telefonen.
- Start appen på nytt ved å trykke på app ikonet.





Viktig sikkerhetsinformasjon: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet for subkutan dosering av insulin i henhold til ordinerings, for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Pumpen kan på en pålitelig og sikker måte kommunisere med kompatible, digitalt tilkoblede enheter.

Control-IQ-teknologi er beregnet for bruk med en kompatibel kontinuerlig glukosemåler (CGM) og insulinpumpen Tandem t:slim X2 for automatisk å øke, redusere eller pause tilførselen av basalinsulin basert på CGM-avlesninger og forutsette glukoseverdier. Control-IQ teknologien kan også gi korreksjonsbolus når glukoseverdien forventes å overstige en forhåndsdefinert terskelverdi. Pumpen er godkjent for bruk hos personer fra 6 år og oppover som trenger en total daglig insulindose på minst 10 enheter og som veier minst 25 kilogram. Pumpen er beregnet for bruk av en enkelt pasient. Se bruksanvisningen for en liste over kompatible insulintyper.

ADVARSEL: Control-IQ teknologi skal ikke brukes av personer under 6 år. Control-IQ teknologi skal heller ikke brukes av personer som trenger mindre enn 10 enheter insulin per dag eller som veier mindre enn 25 kilogram.

Systemet er ikke godkjent for bruk hos gravide kvinner, personer i dialysebehandling eller kritisk syke pasienter. Ikke bruk systemet ved behandling med hydroksyurea. Brukere av pumpen og systemet må: Ønske, og være i stand til å bruke insulinpumpen, CGM og alle andre systemkomponenter i samsvar med bruksanvisningen. Kontrollere blodsukkeret i henhold til anbefalinger fra helsepersonell. Ha tilstrekkelig kunnskap om karbohydratberegning. Opprettholde nødvendig kunnskap om egenbehandling av diabetes. Regelmessig oppsøke helsepersonell. Ha tilstrekkelig syn og/eller hørsel til å oppfatte alle pumpens funksjoner, inkludert advarsler, alarmer og påminnelser. Dersom CGM-avlesningene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, skal blodsukkeret kontrolleres med en blodsuktermåler før det tas avgjørelser om diabetesbehandlingen. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 må kobles fra før MR, CT eller diatermibehandling. Besøk tandemdiabetes.com/safetyinfo for mer viktig sikkerhetsinformasjon.

Informasjonen på skjermen i Tandem t:slim mobile app samsvarer ikke nødvendigvis alltid med informasjonen på pumpeskjermen. Trådløse opplaster fra Tandem t:slim mobile app til den skybaserte Tandem Source-plattformen krever en kompatibel smarttelefon og en trådløs data- eller nettverkstilkobling. Helsepersonell bør ikke bruke opplaster til Tandem Source-plattformen til fjernovervåking, ettersom opplastingen ikke skjer i sanntid. Standard datakostnader fra mobiloperatøren kan påløpe.

Tandem t:slim X2 mobile app: Tandem t:slim mobile app er ment som en sekundær skjerm, en speiling av insulinpumpen Tandem t:slim X2, og kan trådløst laste opp pumpedata til Tandem Source-plattformen. Tandem mobile app er ikke ment for å styre en insulinpumpe og skal ikke erstatte informasjonen som vises på insulinpumpen. Doseringsbeslutninger bør ikke tas basert på den sekundære skjermen. Brukeren skal følge instruksjonene på CGM og insulinpumpen. Denne sekundære skjermen er ikke ment å skulle erstatte selvmonitorering og egenomsorg anbefalt av lege.



Du finner flere hurtigguider, veiledninger og instruksjonsfilmer på rubinmedical.no



↑
Meld deg på
vårt nyhetsbrev

Rubin Medical skal lansere flere nye produkter i tiden som kommer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, få informasjon om våre nye produktlanseringer. Du vil også få nyttig informasjon om insulinpumpen Tandem t:slim X2 og i tillegg få invitasjoner til ulike typer forelesninger.