


1 Opprett en konto i Tandem Source

Gå til → source.tandemdiabetes.com




Klikk på **Opprett konto** for å velge kontotype og oppgi opplysningene dine.

2 Laste opp pumpedataene dine til Tandem Source

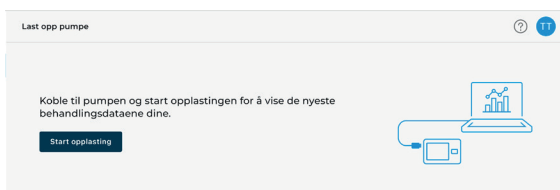

I hovedmenyen, til venstre, går du til **Last opp pumpe** og kobler pumpe til datamaskinen ved hjelp av Tandems USB-kabel. Klikk på **Start opplasting** for å starte opplastingen av pumpedataene dine.

3 Del rapporter med din klinikk

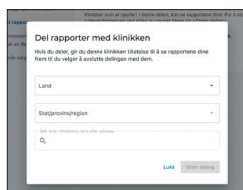

Klikk på profilikonet øverst til høyre og velg **Kontoinnstillinger**. Klikk deretter på **Del rapporter** til venstre under **Generelt** for å søke etter klinikken din.

* Helse- og omsorgspersonell bør ikke bruke opplaster til Tandem Source plattformen for fjernovervåking, da opplasterne ikke skjer i sanntid.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet for subkutan dosering av insulin i henhold til ordning, for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Pumpen kan på en pålitelig og sikker måte kommunisere med kompatible, digitalt tilkoblede enheter.

Control-IQ teknologi er beregnet for bruk med en kompatibel kontinuerlig glukosemåler (CGM) og insulinpumpen Tandem t:slim X2 for automatisk å øke, redusere eller pause tilførselen av basalinsulin basert på CGM-avlesninger og forutsette glukoseverdier. Control-IQ teknologien kan også gi korreksjonsbolus når glukoseverdien forventes å overstige en forhåndsdefinert terskelverdi. Pumpen er godkjent for bruk hos personer fra 6 år og oppover som trenger en total daglig insulindose på minst 10 enheter og som veier minst 25 kilogram. Pumpen er beregnet for bruk av en enkelt pasient. Se bruksanvisningen for en liste over kompatible insulintyper.

ADVARSEL: Control-IQ teknologi skal ikke brukes av personer under 6 år. Control-IQ teknologi skal heller ikke brukes av personer som trenger mindre enn 10 enheter insulin per dag eller som veier mindre enn 25 kilogram.

Systemet er ikke godkjent for bruk hos gravide kvinner, personer i dialysebehandling eller kritisk syke pasienter. Ikke bruk systemet ved behandling med hydroksyurea. Brukere av pumpen og systemet må: Ønske, og være i stand til å bruke insulinpumpen, CGM og alle andre systemkomponenter i samsvar med bruksanvisningen. Kontrollere blodsukkeret i henhold til anbefalinger fra helsepersonell. Ha tilstrekkelig kunnskap om karbohydratberegning. Oppretthold nødvendig kunnskap om egenbehandling av diabetes. Regelmessig oppsøke helsepersonell. Ha tilstrekkelig syn og/eller hørsel til å oppfatte alle pumpens funksjoner, inkludert advarsler, alarmer og påminnelser. Dersom CGM-avlesningene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, skal blodsukkeret kontrolleres med en blodsuktermåler før det tas avgjørelser om diabetesbehandling. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 må kobles fra MR, CT eller diatermibehandling. Besøk tandemdiabetes.com/safetyinfo for mer viktig sikkerhetsinformasjon.

Plattformen Tandem Source er ment å brukes av personer med diabetes mellitus som benytter insulinpumpesystemer fra Tandem Diabetes Care, deres foresatte og deres helsepersonell, både hjemme og i kliniske omgivelser. Tandem Source plattformen støtter diabetesbehandling gjennom visning og analyse av pumpe- og behandlingsdata som lastes opp fra Tandems insulinpumper.

Rubin
medical

Rubin Medical AS • Heggroveien
72 3403 Lier • post@rubinmedical.no
480 80 830


TANDEM
Diabetes Care

Rubin
medical



Tandem Source

For opplasting og visning av viktig informasjon knyttet til diabetesbehandlingen din.

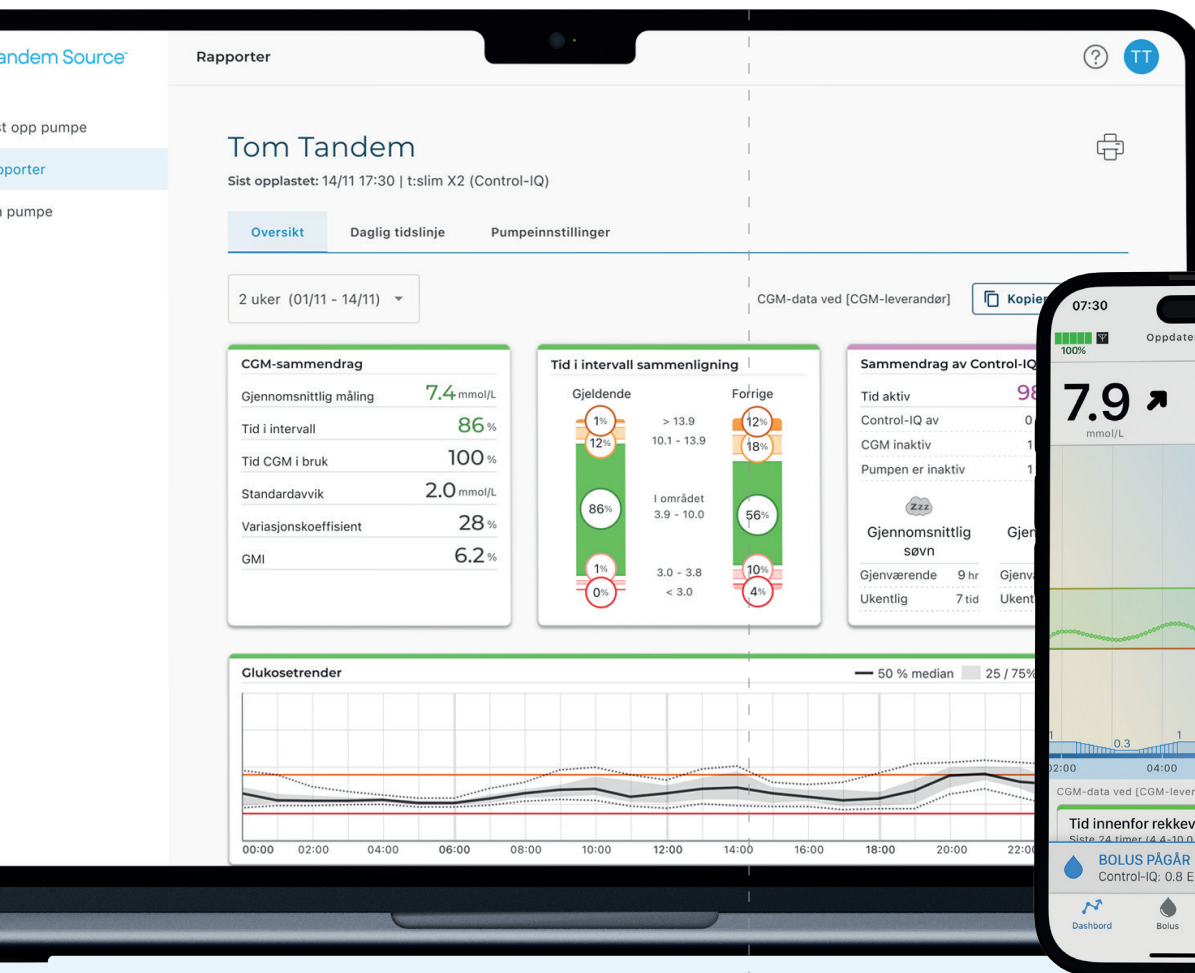

Tandem Source-plattformen gjør det **enkelt å vise og analysere data** fra Control-IQ teknologien

Hvis du bruker Tandem t:slim mobile app, blir pumpedataene dine automatisk lastet opp til Tandem Source. På denne måten slipper du å laste opp via en datamaskin.*



Se brukerveiledningen til Tandem Source for mer detaljerte instruksjoner om hvordan du oppretter en konto.



Ingen dataprogrammer å installere

Tandem Source plattformen er nettbasert. Du kan laste opp pumpedata manuelt med en kabel eller trådløst via appen Tandem t:slim Mobile App.



Tre brukervennlige rapporter

Se tre letteste rapporter med informasjon om pumpen og behandlingsdata. Del denne informasjonen med klinikken din, slik at dere sammen kan gjøre de nødvendige justeringene i behandlingen din.



Helt gratis

Tandem Source-plattformen er tilgjengelig både for deg og din klinikk uten kostnad.