



Tandem Source

Slik kommer du i gang

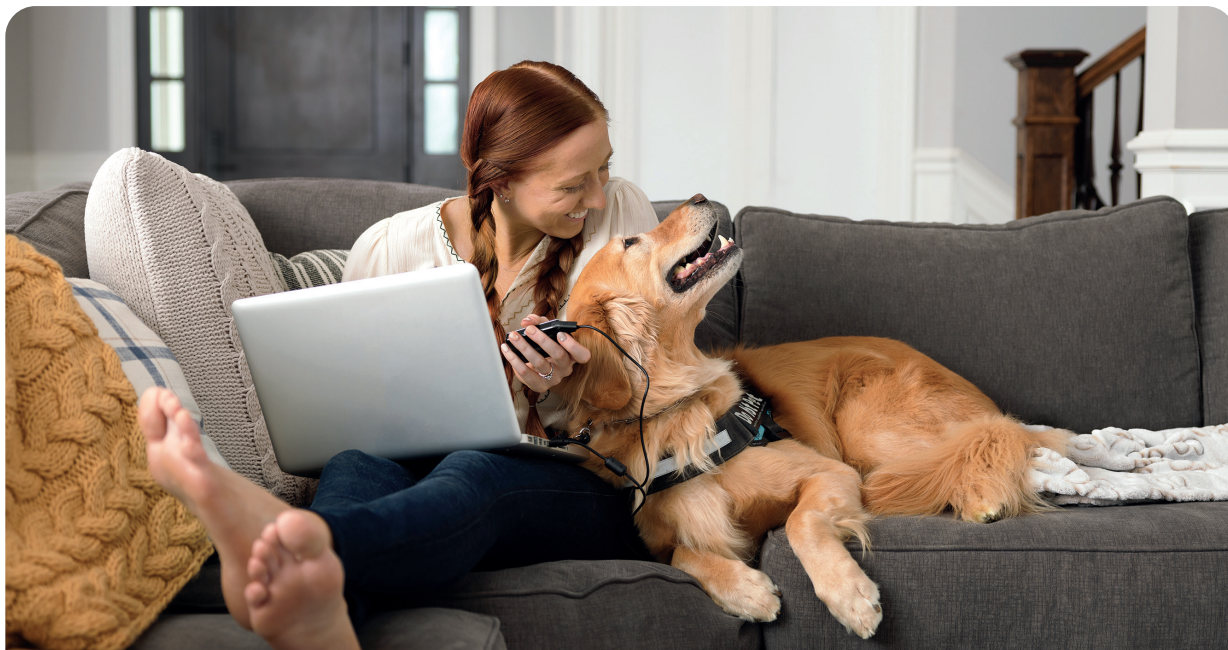

Logg inn på
source.tandemdiabetes.com

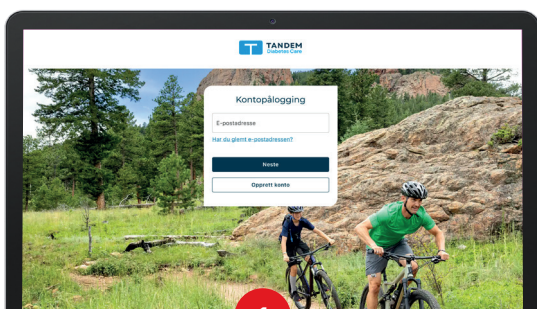


1

Opprett konto

Hvis du allerede har en konto i Tandem Source logger du inn med e-postadresse og passord.

Hvis du ikke har en konto i Tandem Source, klikk på **Opprett konto** og følg instruksjonene. En verifiseringsmail vil bli sendt deg for aktivering av kontoen din.

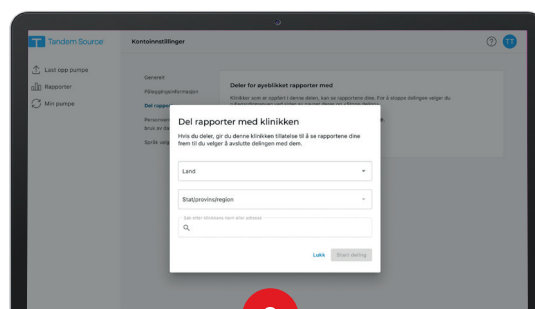


2

Dele rapporter med din klinikk

Klikk på sirkelen med dine intitaler oppe i høyre hjørne og velg **Kontoinnstillinger**.


- Velg **Dele rapporter** og klikk deretter på **Legg til klinikk**.
- **Begrens søkeresultatene** ved å velge sted eller ved å skrive navnet på klinikken din.
- **Velg din klinikk** og bekreft ved å kontrollere adressen som vises.

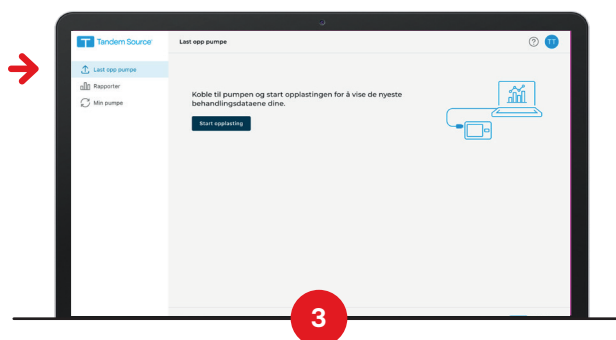

Laste opp pumpen


Klikk på **Last opppumpe** i navigeringsfeltet til venstre.

- Koble pumpen til datamaskinen med USB-kabelen som følger med pumpen (Tandems originalledning).
- Klikk på Start Opplasting for å starte opplastingen av data.
- La pumpen være tilkoblet til en bekreftelse kommer på at overføringen har lyktes.

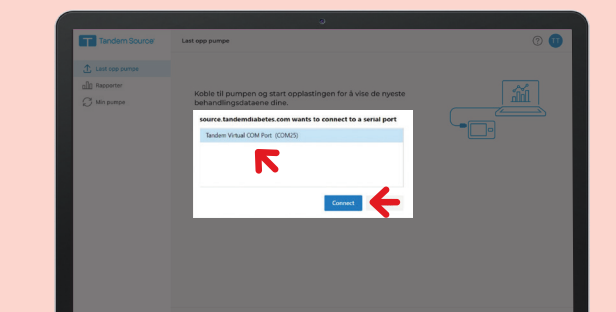

Dialogrute?

Dersom nettleseren din viser en dialogrute for å koble til en COM-port, klikker du på **Tandem virtuell COM-port** for å markere den, og klikker deretter på **Koble til**.

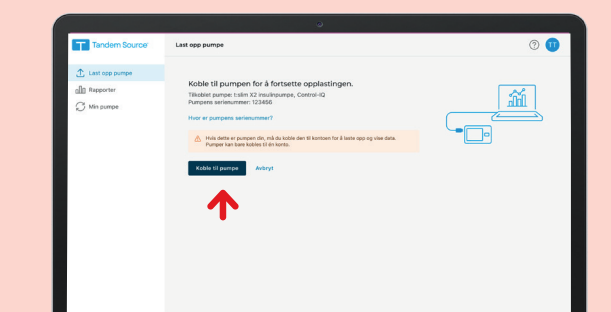

Koble Til Pumpe

Første gangen du laster opp data vil du bli oppfordret til å koble til pumpen din. Velg **Koble Til Pumpe**.

Kontakt Rubin Medical ved behov for ytterligere support

Plattformen Tandem Source er ment brukt av personer med diabetes mellitus som benytter insulinpumpesystemer fra Tandem Diabetes Care, deres foresatte og deres helsepersonell, både hjemme og i kliniske omgivelser. Tandem Source-plattformen støtter diabetesbehandling gjennom visning og analyse av pumpe- og behandlingsdata som lastes opp fra Tandems insulinpumper.

© 2026 Rubin Medical AS. Med enerett. Tandem Diabetes Care er et registrert varemerke, og Tandem-logoene, Tandem Source og t:slim X2 er varemerker som tilhører Tandem Diabetes Care, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker fra tredjeparter tilhører sine respektive eiere.

rubinmedical.no • Tel 480 80 830