



Tandem Source


Oppdatere programvaren i din insulinpumpe

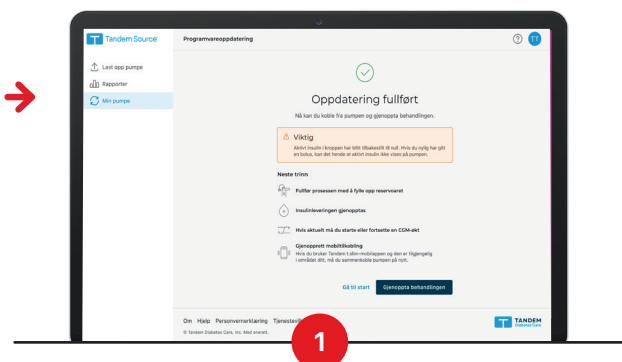


Disse instruksjonene beskriver hvordan du programvareoppdaterer insulinpumpen Tandem t:slim X2 i Tandem Source for å få tilgang til nye funksjoner.

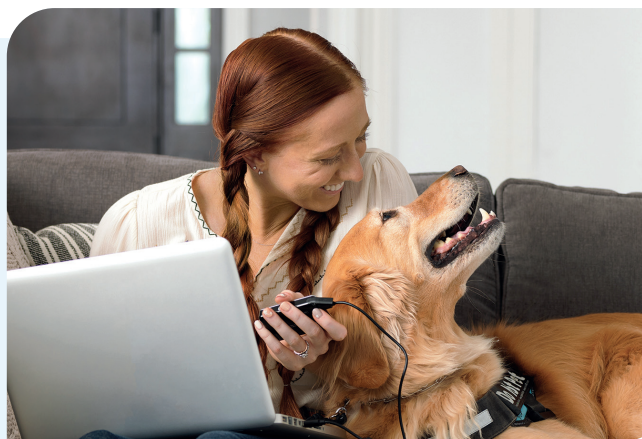

Logg inn på Tandem Source. Velg **Programvareoppdatering** fra menyen til venstre. Klikk på **Fortsett** etter å ha sjekket oppdateringskravene og sikkerhetsinformasjonen.

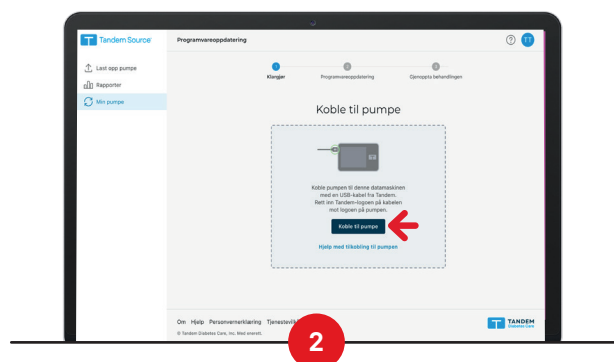

Koble pumpen til datamaskinen med ladekabelen som fulgte med pumpen. Klikk på **Koble Til Pumpe**.

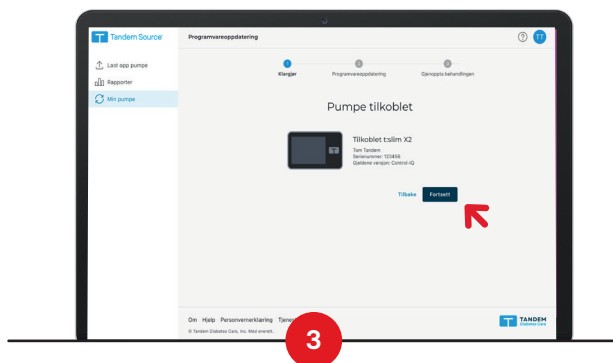

Dersom tilkoblingen lykkes, vises skjermen **Pumpe tilkoblet**. Bekrefte at pumpens serienummer er korrekt før du klikker på **Fortsett**.



Fortsett å følge instruksjonene på skjermen i Tandem Source og fullfør alle nødvendige handlinger på insulinpumpen Tandem t:slim X2.




En skjerm for restart av pumpen vises. Trykk på for å restarte pumpen og bekreft at insulintilførselen er stoppet.



Programvareoppdateringen starter. Forbli tilkoblet til internett og ikke koble pumpen fra datamaskinen under prosessen.



Oppdateringen er fullført.

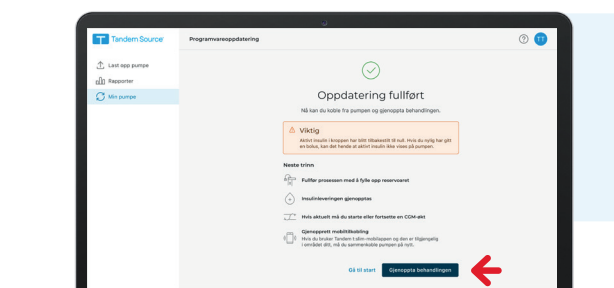

Viktig: Klikk på **Fortsett** i Tandem Source for å få ytterligere instruksjoner om hvordan du trygt gjenopptar insulintilførselen.

Kontakt Rubin Medical ved behov for ytterligere support

Obs: Dette er et forkortet instruksjonsmateriale. Kun noen steg og skjermer vises. For mer detaljert informasjon henviser vi til bruksanvisningen for insulinpumpen Tandem t:slim X2.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er beregnet for subkutan dosering av insulin i henhold til ordning, for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin. Pumpen kan på en pålitelig og sikker måte kommunisere med kompatible, digitalt tilkoblede enheter.

ADVARSEL: Control-IQ teknologi skal ikke brukes av personer under 6 år. Control-IQ teknologi skal heller ikke brukes av personer som trenger mindre enn 10 enheter insulin per dag eller som veier mindre enn 25 kilogram.